



CASO CLÍNICO

MULTINEO™



ANTES DE LA CIRUGÍA

Situación inicial

Paciente de 72 años que acude a clínica por PUENTE CERÁMICO 35-37 DE HACE 20 AÑOS CON MOVILIDAD.

Diagnóstico

Paciente con MOVILIDAD EN PUENTE CERÁMICO DE 35 A 37 POR DETERIORO DE LOS MUÑONES DEBIDO A CARIES, ASÍ COMO PÉRDIDA DE HUESO EN 35 QUE FAVORECE LA FALTA DE SOPORTE.

DURANTE LA CIRUGÍA

Tratamiento

Extracción de las piezas 35 y 37, limpieza mecánica mediante legrado de los alveolos, así como química mediante H₂O₂ por un minuto. Fresado y colocación de implante NINA CS de 4,2x10 mm en diente 35, NINA CS 7,75 x 10mm en posición 36 y NINA CS 4,2 x 8 mm en posición 37, todos ellos a 40N de torque. Posteriormente se rellenan ambos alveolos con Xenoinjerto Matrixoss y se procede a la sutura.



DR. DANIEL ESCRIBANO

Experto en implantología oral
y líder de opinión para Alpha-Bio Tec en Europa

Si quieres ver el
VIDEO COMPLETO
de este caso

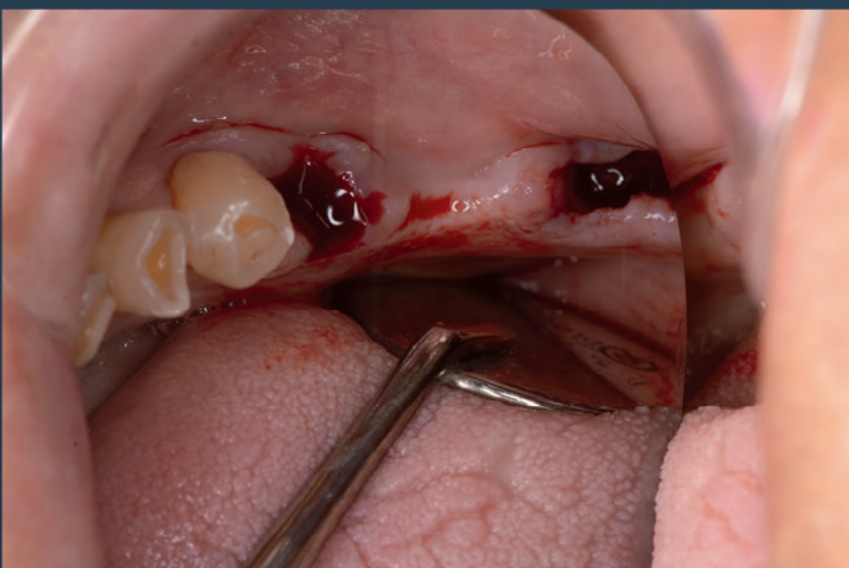




Imagen lateral del puente cerámico



Imagen oclusal del puente cerámico



Situación tras las extracciones dentales
de las piezas 35 y 37.

MULTIneo™





4


Visión de la cresta ósea

5

MULTIneo™




Colocación de implantes MultiNeO Nina Conexión CS

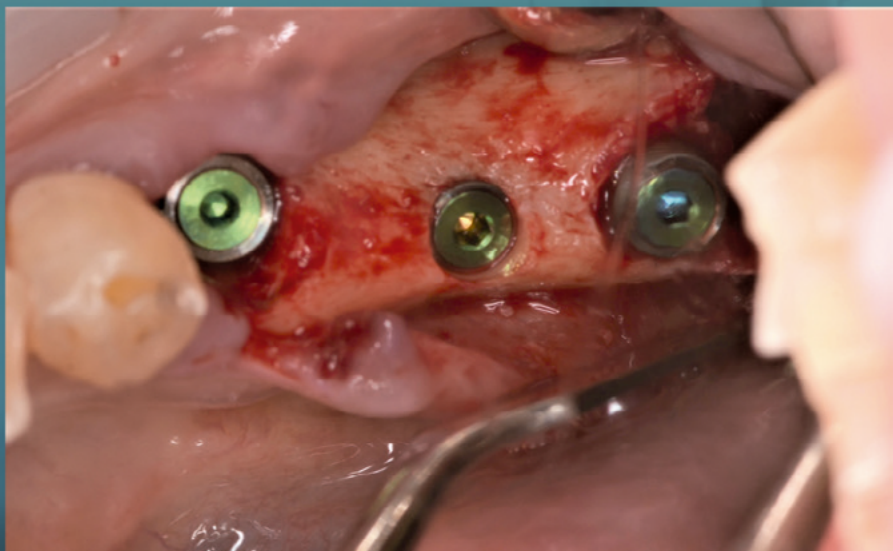

6

7

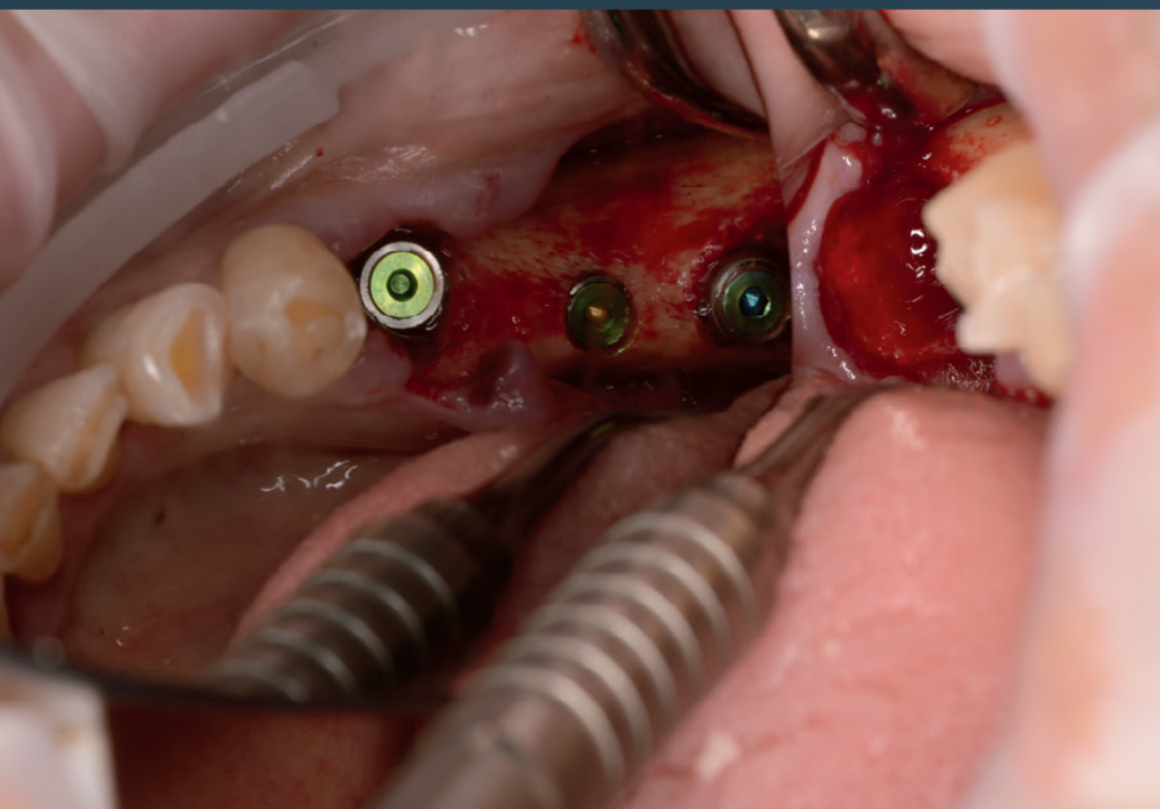

8

MULTINEO™





Situación de la zona implantada
a las 6 semanas de la colocación
de los implantes



9

10

MULTIneo™







Colocación de los pilares TCT para rehabilitación múltiple.



Colocación de scanbodies para TCT para toma de impresión digital mediante TRIOS

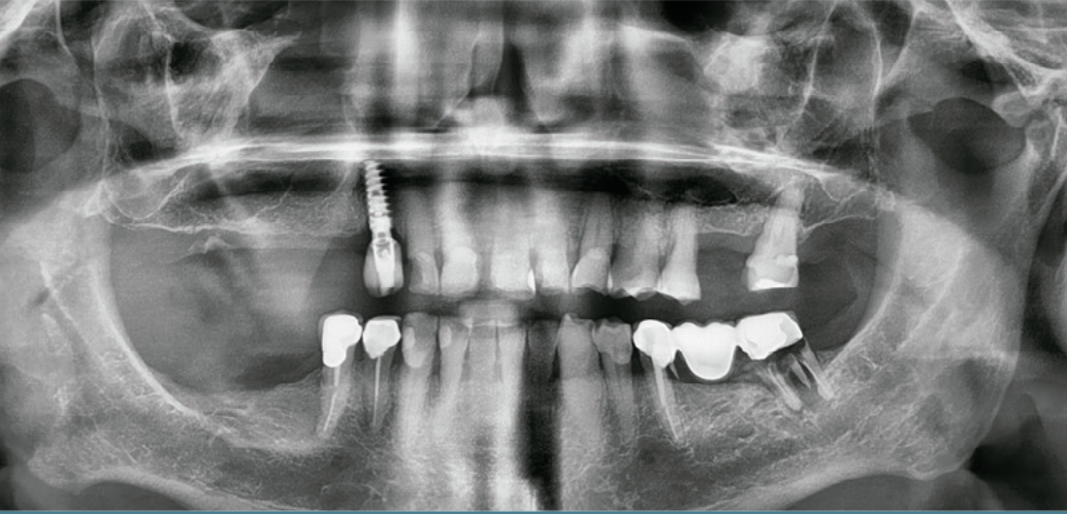

Ortopantomografía preoperatoria

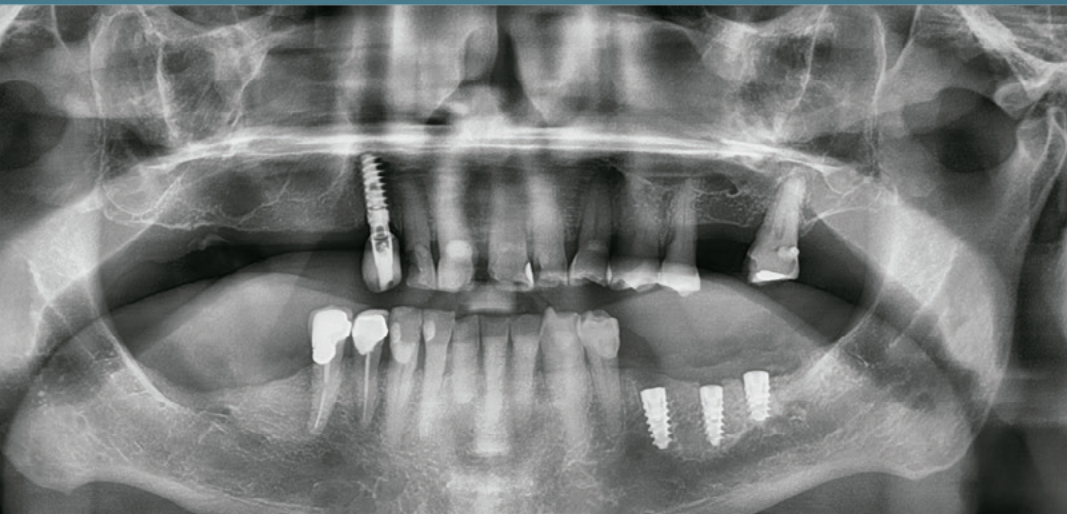

Ortopantomografía postoperatoria



Ortopantomografía a las 6 semanas
de la colocación de los implantes

MULTIneo™



CONCLUSIÓN CLÍNICA SOBRE EL IMPLANTE NINA

La experiencia durante la colocación del implante NINA es muy similar a la colocación del implante MULTINEO convencional observando durante su instalación una mayor capacidad hidrofílica hacia la sangre.

El mayor beneficio del implante NINA es la aceleración de los tiempos de osteointegración, así como su mayor BIC.

MULTINEO™

